


MiniBone

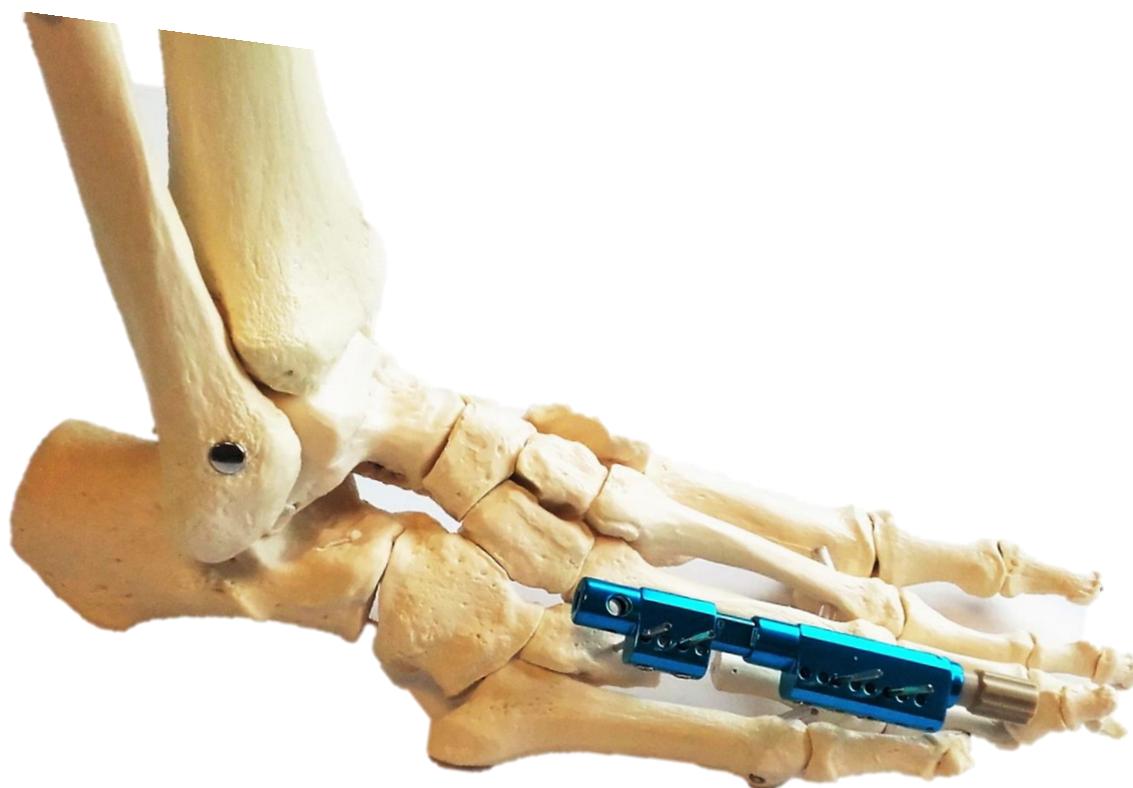

Хирургическая техника индекс С
(22/08/2016)

I- Краткое описание



Показания к применению

Minibone – это медицинское устройство для восстановления или коррекции кости.
Основное применение — лечение брахиметатарзии



Также возможно использовать при :

- растяжении связок кисти
- сращении перелома (запястья или плюсневой кости)
- восстановлении челюстной кости при линейном переломе
- восстановлении челюстной кости при кольцевидном переломе

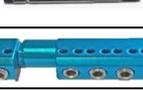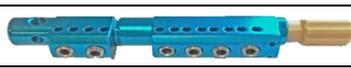	Индекс	Наименование
	2010-1016	Самосверлящая спица 2*50 титан
	2010-2010	Самосверлящая спица 2*50 нержавеющая сталь
	2010-1005	Самосверлящая спица 1.5*50 титан
	2010-1007	Самосверлящая спица 1.5*50 нержавеющая сталь
	1060-1014	Minibone
	Wera 2 нержавеющая	ключ-шестигранник, торцевой ключ

Для надлежащего использования MiniBone следуйте нижеуказанной хирургической технике.

II- Хирургическая техника

Шаг 1: Установка Minibone

Установите Minibone в исходное положение (0 мм)



Шаг 2: Введение спиц (вручную с помощью ортопедической дрели)

Сначала введите первую спицу (диаметром 1,5 мм или 2 мм (нержавеющая сталь или титан) в проксимальный отдел соответствующей плюсны (на рисунке это 4- й палец)



Далее используйте Minibone в качестве проводника для введения других спиц.




Шаг 3: Остеотомия

Сделайте разрез плюсны между 2-й и 3-й спицей



Шаг 4: Позиционирование MiniBone

- Установите MiniBone на все четыре спицы
- Зафиксируйте MiniBone в оптимальном положении, закручивая винты с помощью шестигранного ключа для надежной фиксации спиц

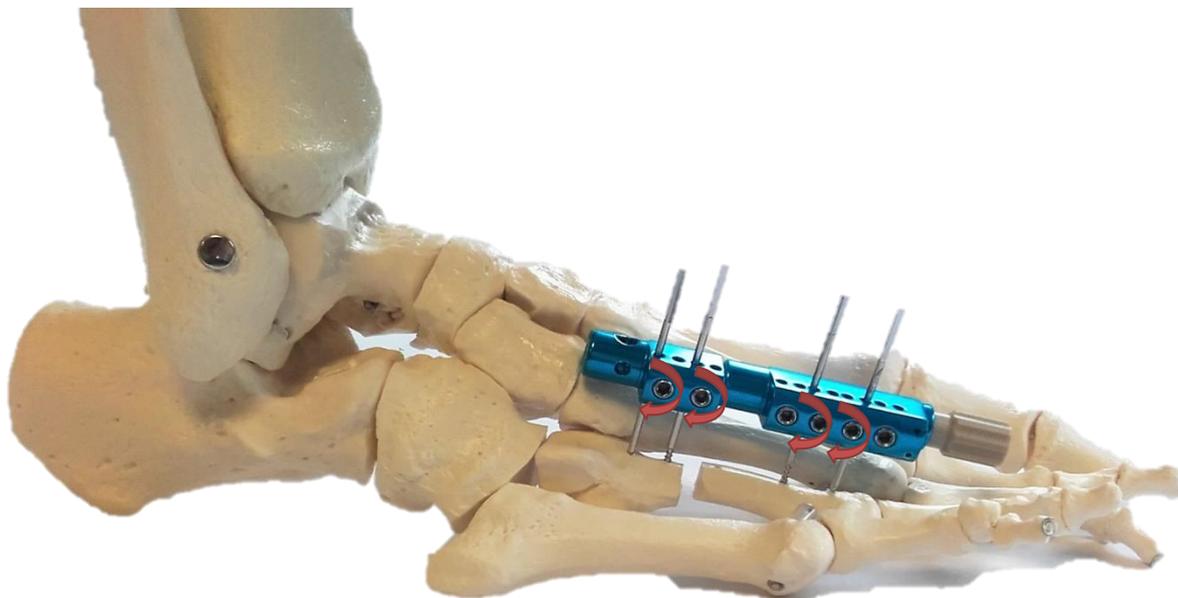

Шаг 5: Нарастивание длины

Постепенно откручивайте (частота и степень вытяжения определяются хирургом) гаечный регулятор для восстановления кости



Будьте осторожны: не превышайте максимальную величину растяжения MiniBone (предельная точка 2,5 см отмечена СТОП-линией)



БРАХИМЕТАТАРЗИЯ




minibone






COD КРУГОВОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА

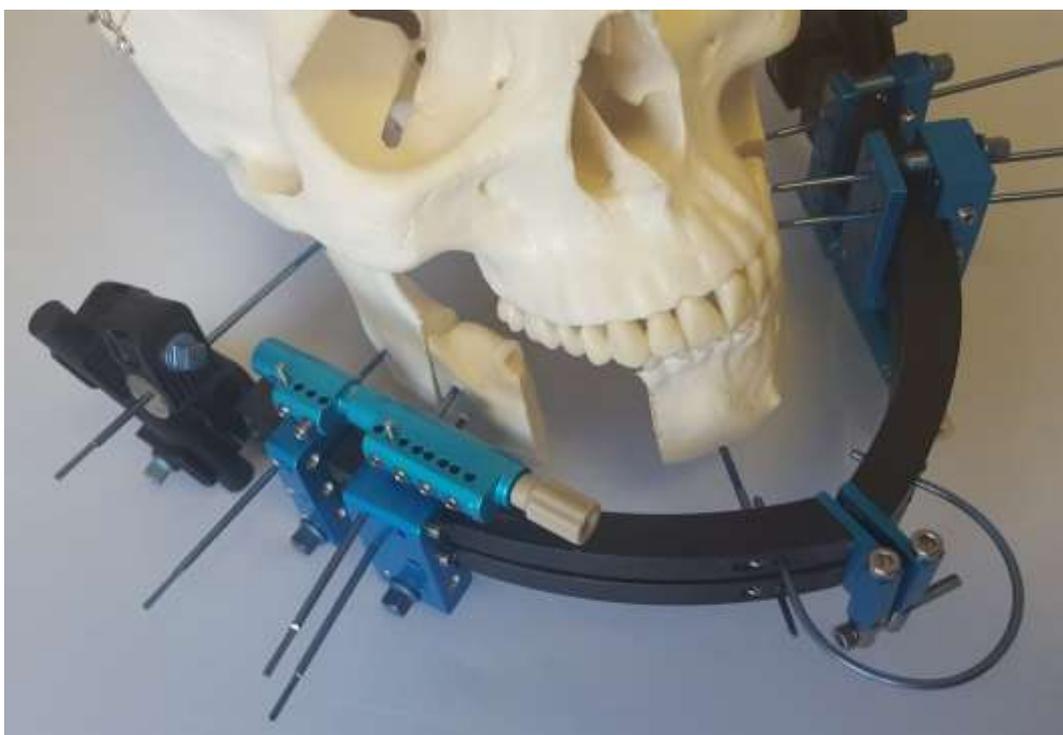



LOD Linear Osteosynthesis Device

ЛИНЕЙНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА

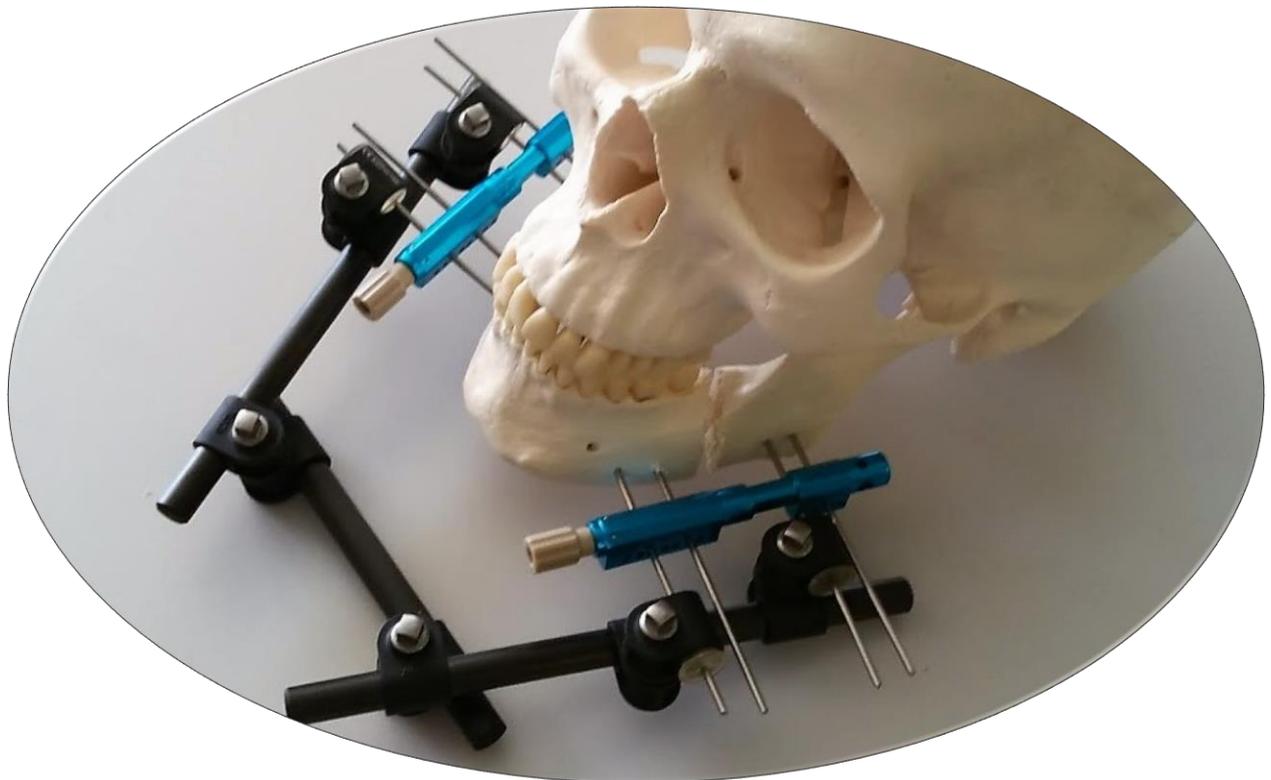

JPP management
implantation Minibone
CH Annecy Dr Leslie Noyelles

Aout 2016

D

W:4075
C:2040

Zone
pseudarthrose

Zone
transportée

PA
11-32-29
CR850

